


Suprasson®

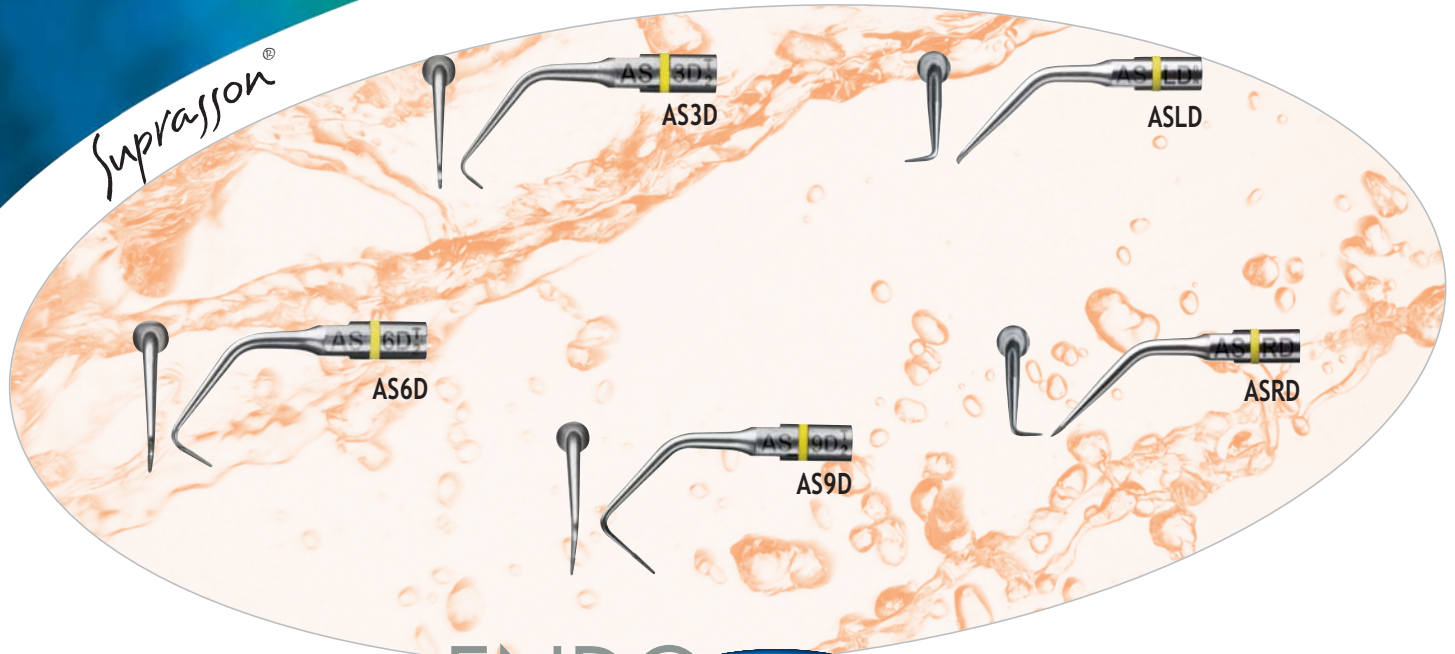

ENDO **success**
APICAL SURGERY

Micro-chirurgie endodontique Apical micro surgery

Conseils d'utilisation - *Recommendations for use*



AS3D

Longueur de travail = 3 mm
Insert universel de chirurgie apicale.
Premier instrument de la séquence.

*Working length = 3mm
Universal apical surgery tip.
First instrument of the sequence.*



AS6D

Longueur de travail = 6 mm
Deuxième instrument de la séquence.
Dents antérieures.

*Working length = 6mm
Second instrument of the sequence.
Front teeth.*




AS9D

Longueur de travail = 9 mm
Cas complexes - permet la préparation du
canal radiculaire jusqu'à 9 mm.
Dents antérieures.

*Working length = 9mm
Complicated cases - allows the preparation
of the root canal up to 9mm.
Front teeth.*

Le micro-insert à ultrasons AS3D permet aujourd'hui de préparer le système canalaire a retro sur une longueur d'au moins 3 mm.
Les inserts à ultrasons plus longs, AS6D et AS9D, permettent de préparer jusqu'à 10 mm le système canalaire.
Le diamantage n'est présent que sur la pointe de l'instrument afin de ne pas surpréparer le canal.

*The ultrasonic micro-tip AS3D allows retrograde preparation of the canal system over a length of at least 3mm.
The longer ultrasonic tips, AS6D and AS9D, allow preparation up to 10mm of the canal system.
Diamond-coated is present only on the instrument tip in order not to overprepare the canal.*

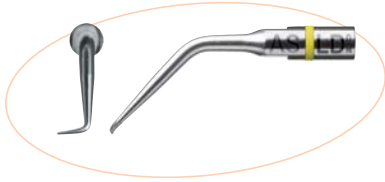

ASLD

Longueur de travail = 3 mm
Insert orienté vers la gauche, prémolaires, molaires.

*Working length = 3mm
Left oriented tip, pre-molars, molars.*








ASRD

Longueur de travail = 3 mm
Insert orienté vers la droite, prémolaires, molaires.

*Working length = 3mm
Right oriented tip, pre-molars, molars.*



| |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
| | AS3D | AS6D | AS9D | ASLD | ASRD |
| | Ref. F00065 | Ref. F00079 | Ref. F00067 | Ref. F00080 | Ref. F00081 |
| P-Max Newtron XS | 3-7 | 3-7 | 5-7 | 6-9 | 6-9 |
| P5 Newtron - P5 Newtron LED / P5 Newtron XS - P5 Newtron XS LED | 3-7 | 3-5 | 5-7 | 6-9 | 6-9 |
| P-Max Newtron/Lux Prophy Max Newtron/Lux | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 5-9 | 5-9 |
| P5 Booster | 2-5 | 2-5 | 4-5 | 6-9 | 6-9 |
| Module SP Newtron (LED) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 3-5 | 3-5 |

